




# SHERAFINA®-RAPID

## Rapport de mélange conseillé poudre de revêtement : SHERALIQUID

Nos conseils reposent sur nos résultats en laboratoire et ont des valeurs indicatives. Divers facteurs extérieurs, comme par exemple la température de la pièce, le taux d'humidité ou le réglage du malaxeur peuvent influencer les résultats. Veuillez respecter toujours les modes d'emploi. En cas de question technique, nous sommes volontiers à votre disposition.

Pour un sachet de revêtement de 160 g, vous aurez besoin de 42 ml de liquide (total). La concentration du liquide d'expansion est indiquée comme suit:

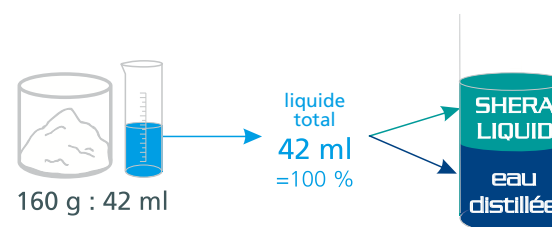

Métaux	Inlays core & Inlays		Couronnes en cire		Téléscopes en résine à modeler		Couronnes côniques en résine à modeler	
	SHERA LIQUID	+ eau distillée	SHERA LIQUID	+ eau distillée	SHERA LIQUID	+ eau distillée	SHERA LIQUID	+ eau distillée
Alliage à haute teneur en or Alliage 70 %- 80 % au	18 ml 42 %	+ 24 ml 58 %	20 ml 47 %	+ 22 ml 53 %	25 ml 60 %	+ 17 ml 40 %	24 ml 58 %	+ 18 ml 42 %
Alliage précieux 55 % - 65 % au	18,5 ml 44 %	+ 23,5 ml 56 %	21 ml 50 %	+ 21 ml 50 %	28,5 ml 68 %	+ 13,5 ml 32 %	27 ml 65 %	+ 15 ml 35 %
Alliage base palladium	33,6 ml 80 %	+ 8,4 ml 20 %	28,5 ml 68 %	+ 13,5 ml 32 %	35 ml 84 %	+ 7 ml 16 %	33 ml 79 %	+ 9 ml 21 %

Alliage non-précieux

35,7 ml  
85 %

+ 6,3 ml  
15 %

38 ml  
90 %

+ 4 ml  
10 %

38 ml  
90 %

+ 4 ml (10%)  
SHERA LIQUID-EXTRA

ou réduire la quantité totale de liquide à  
38 ml = 100% SHERALIQUID