



# SHERACAST 2000

Proporciones de mezcla recomendadas - polvo de revestimiento : **SHERALIQUID**

Nuestras recomendaciones son valores orientativos y se basan en resultados de prueba de nuestro laboratorio. Varios factores locales como por ejemplo la temperatura ambiente, la humedad o ajustes de la batidora pueden influir los resultados. Por favor sigan las instrucciones de uso. Para cualquier tipo de pregunta técnica, nos es grato ayudarles.

	polvo	líquido total		<b>SHERALIQUID</b>	+	agua desmineralizada
Preparación del modelo	<b>100 g</b>	<b>23 ml</b>	de eso	<b>18,4 ml (80 %)</b>	+	<b>4,6 ml (20 %)</b>
Cilindro	<b>100 g</b>	<b>23 ml</b>	de eso	<b>11,5 ml (50 %)</b>	+	<b>11,5 ml (50 %)</b>
	<b>400 g</b>	<b>92 ml</b>		<b>46,0 ml (50 %)</b>		<b>46,0 ml (50 %)</b>
Cera fotopolimerizable	<b>100 g</b>	<b>21 ml</b>	de eso	<b>16,8 ml (80 %)</b>	+	<b>4,2 ml (20 %)</b>
	<b>600 g</b>	<b>126 ml</b>	de eso	<b>100,8 ml (80 %)</b>	+	<b>25,2 ml (20 %)</b>