



SHERACAST

Rapport de mélange conseillé poudre de revêtement : **SHERALIQUID**

Nos conseils reposent sur nos résultats en laboratoire et ont des valeurs indicatives. Divers facteurs extérieurs, comme par exemple la température de la pièce, le taux d'humidité ou le réglage du malaxeur peuvent influencer les résultats. Veuillez respecter toujours les modes d'emploi. En cas de question technique, nous sommes volontiers à votre disposition.

	poudre	liquide total		SHERALIQUID	+	eau distillée
Modèle Duplication à la gélatine	100 g	19 ml	dont	13,3 ml (70 %)	+	5,7 ml (30 %)
Modèle Duplication au silicone	100 g	21 ml	dont	16,8 ml (80 %)	+	4,2 ml (20 %)
Enrobage	100 g	21 ml	dont	10,5 ml (50 %)	+	10,5 ml (50 %)
	400 g	84 ml	dont	42,0 ml (50 %)	+	42,0 ml (50 %)
Cire photo-polymérisable	100 g	21 ml	dont	16,8 ml (80 %)	+	4,2 ml (20 %)
	600 g	126 ml	dont	101,0 ml (80 %)	+	25,0 ml (20 %)