

SHERAEXACT 65

INSTRUCCIONES DE USO

1. Indicación

SHERAEXACT 65 es una silicona de condensación reticulada muy viscosa para el uso en el laboratorio. Especialmente apropiado para rodetes, registros de mordida, modelos para prótesis de reparación y para la ortodoncia como también para aislar los dientes de la escayola en las muflas.

2. Aplicación

1. Sacar la base con ayuda de la cuchara del bote (1 cuchara = aprox. 20 g)
2. Aplicar SHERAPASTENHÄRTER encima de SHERAEXACT 65 4 cm (aprox. 0,5 g)
3. Amasar ambos componentes de la manera que reciban una pasta de color homogénea

Importante:

Cerrar el cubo de la base y el tubo del activador inmediatamente después de cada uso.

Evitar el contacto del activador con la piel y con los ojos.

Usar guantes protectores.

3. Datos técnicos (tiempos a partir del comienzo de la mezcla calculado a 23°C, fraguado en boca)

Tiempo de mezcla	40 segundos
Tiempo de trabajo	aprox. 2 minutos
Tiempo de fraguado	aprox. 7 minutos
Dureza Shore A (después de 24 horas)	65
Resistencia al calor (°C)	130°C

Más activador y temperaturas más altas reducen el tiempo de endurecimiento, menos activador y temperaturas más bajas aumentan el tiempo de endurecimiento.

4. Garantía

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH posee la certificación DIN EN ISO 13485 y garantiza una total calidad de los productos gracias a un costoso sistema de aseguramiento de la calidad. Las recomendaciones que hacemos a nuestros usuarios están basadas en los datos de referencia obtenidos en nuestro laboratorio de ensayos. Estos datos pueden garantizarse solamente si se siguen los procedimientos descritos. El usuario es el único responsable de la manipulación del producto. No asumimos responsabilidad alguna por resultados defectuosos, ya que SHERA no tiene ningún control sobre la manipulación posterior del producto. Eventuales reclamaciones de indemnización por daños podrán referirse exclusivamente al valor de nuestros productos.