

Farbloses Universaltrennmittel auf Wachsbasis

1. Indikation

- Trennt z.B. Gips gegen Gips, Polyätherabdrücke gegen SHERAPOLAN (Modellkunststoff), SHERAPOLAN gegen SHERAPOLAN
- Trennt nicht Gips gegen Wachs und Gips gegen Kunststoff.

2. Allgemeine Verarbeitungshinweise

- Vor Gebrauch kräftig schütteln.
- Aus einer Entfernung von 20 - 30 cm langsam und gleichmäßig einen dünnen Trennfilm aufsprühen.
- Trennfilm gut trocknen lassen

3. Empfehlungen und Hinweise

- Bei der Isolierung von Gips gegen Gips kann eine zu dicke Isolierschicht weiche und inhomogene Flächen beim Abbinden des frischen Gipses entstehen lassen. Zu dick aufgetragene Isolierung daher vorsichtig abblasen (trocknen).
- Bei der Isolierung von Polyätherabdrücken gegen SHERAPOLAN sollte die Isolierung aufgepinselt werden. SHERASEPAL-U in ein Gefäß sprühen und damit die zu isolierenden Stellen einpinseln. Gut trocknen lassen und den Vorgang 2 - 3 Mal wiederholen.

Gewährleistung

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG ist nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und garantiert für die Produkte, aufgrund eines aufwendigen Qualitätssicherungssystems, eine einwandfreie Qualität. Unsere Anwenderempfehlungen beruhen auf in unserem Versuchslabor ermittelten sog. Richtwerten. Diese Werte können nur garantiert werden, wenn die angegebenen Verfahrensschritte eingehalten werden. Der Benutzer ist für die Bearbeitung der Produkte selbst verantwortlich. Für fehlerhafte Ergebnisse wird nicht gehaftet, da SHERA keinen Einfluß auf die Weiterverarbeitung hat. Eventuell dennoch auftretende Schadensersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Warenwert unserer Produkte.

