

Séparateur universel incolore à base de cire

### 1. Indication

- Isole, par exemple, plâtre contre plâtre, empreintes polyéthers contre SHERAPOLAN (résine pour modèles), SHERAPOLAN contre SHERAPOLAN.
- N'isole pas le plâtre contre la cire et la cire contre la résine.

### 2. Indications générales de manipulation

- Secouer fortement avant usage.
- Vaporiser une fine pellicule délicatement et de façon homogène en conservant une distance de 20 à 30 cm avec l'objet.
- Laisser sécher la fine pellicule entièrement.

### 3. Recommandations et indications

- En isolant plâtre contre plâtre, une couche trop épaisse est susceptible de se former ; il est possible de l'amoinrir avec délicatesse à l'air comprimé. La pellicule trop épaisse peut provoquer des surfaces non-durcies et irrégulières au moment de la prise du plâtre.
- Pour les empreintes polyéthers contre SHERAPOLAN, la pellicule doit être appliquée au pinceau. SHERASEPAL-U doit être d'abord vaporisé dans un récipient et à l'aide d'un pinceau appliqué sur la partie à isoler. Bien laisser sécher et renouveler cette action 2 à 3 fois.

### Garantie

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG est certifié DIN EN ISO13485 et garantit une première qualité à ses produits, grâce aux contrôles effectués en permanence à tous les stades de la production. Nos modes d'emploi se basent sur nos tests en laboratoires et sur nos expériences. Les spécifications techniques sont indicatives mais peuvent être obtenues en suivant absolument à la lettre ce mode d'emploi. L'utilisateur est seul responsable de la façon dont il emploie les produits. Nous ne pouvons être tenus responsables de résultats insatisfaisants, étant donné que nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre des produits. Les dédommagements, qui toutefois peuvent s'effectuer, se limitent uniquement à la valeur commerciale du produit.

