

Separador universal incoloro a base de cera

1. Indicación

- Separa p.ej. escayola contra escayola, impresiones de poliéster contra SHERAPOLAN (resina para modelar), SHERAPOLAN contra SHERAPOLAN
- NO separa escayola contra cera ni escayola contra acrílico.

2. Avisos generales para el procesamiento

- Agitar bien antes de usar.
- Pulverizar con el spray una capa de separación fina y homogénea desde una distancia de 20 - 30 cm.
- Dejar secar bien la capa de separación.

3. Recomendaciones y advertencias

- Una capa de separación que está demasiado espesa en cuanto se separe escayola contra escayola puede causar superficies blandas y poco homogéneas durante el fraguado de la escayola fresca. Por eso se puede secar cuidadosamente la capa de separación demasiado espesa con aire comprimido.
- Cuando se separa impresiones de poliéster contra SHERAPOLAN el separador se debería aplicar con un pincel. Pulverizar SHERASEPAL-U en un contenedor y aislar los partes a separar usando un pincel. Dejar secar bien y repetir este proceso de la aplicación con pincel por segunda o tercera vez.

Garantía

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG posee la certificación DIN EN ISO13485 y garantiza una total calidad de los productos gracias a un costoso sistema de aseguramiento de la calidad. Las recomendaciones que hacemos a nuestros usuarios están basadas en los datos de referencia obtenidos en nuestro laboratorio de ensayos. Estos datos pueden garantizarse solamente si se siguen los procedimientos descritos. El usuario es el único responsable de la manipulación del producto. No asumimos responsabilidad alguna por resultados defectuosos, ya que SHERA no tiene ningún control sobre la manipulación posterior del producto. Eventuales reclamaciones de indemnización por daños podrán referirse exclusivamente al valor de nuestros productos.

