

Nettoyant d'armatures

Indication

Liquide dégraissant et nettoyant prêt à l'emploi. Pour armatures métalliques sablées, utilisation avant la cuisson de la céramique.

Manipulation

- Remplir GERÜSTCLEANER dans un récipient en verre ou en plastique avec couvercle
- Plonger l'armature à nettoyer
- Fermer le récipient et nettoyer pendant 5 minutes en bain à ultra sons
- Laisser reposer l'armature pendant 5 minutes dans le liquide
- Sortir l'armature à l'aide d'une pincette
- Eviter de mélanger le liquide pendant la sortie de l'armature
- Ensuite, ne pas rincer l'armature avec de l'eau et ne pas sécher à l'air comprimé car des salissures se trouvent dans l'air
- En cas d'usage fréquent, changer le liquide quotidiennement et rincer le récipient

Garantie

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG est certifié DIN EN ISO13485 et garantit une première qualité à ses produits, grâce aux contrôles effectués en permanence à tous les stades de la production. Nos modes d'emploi se basent sur nos tests en laboratoires et sur nos expériences. Les spécifications techniques sont indicatives mais peuvent être obtenues en suivant absolument à la lettre ce mode d'emploi. L'utilisateur est seul responsable de la façon dont il emploie les produits. Nous ne pouvons être tenus responsables de résultats insatisfaisants, étant donné que nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre des produits. Les dédommagements, qui toutefois peuvent s'effectuer, se limitent uniquement à la valeur commerciale du produit.

