

#### 1. Indikation

SHERAPORAL ist ein auf biologischer Basis entwickelter Tauchhärter. Er enthält keinerlei organische Lösungsmittel und entwickelt keine gesundheitsschädlichen Dämpfe. SHERAPORAL ist ungiftig und kann einfach entsorgt werden.

#### 2. Einsatzbereich

Für alle Modellgusseinbettmassen geeignet.

#### 3. Handhabung bei Modellgusseinbettmassen

SHERAPORAL in ein Kunststoff- oder Glasgefäß (mit Deckel) schütten.  
Duplikatmodell bei 170 - 180°C ca. 20 Minuten trocknen.

#### 4. Bitte unbedingt beachten:

Modell muss gut durchgetrocknet sein.

Ca. 2 Sekunden in Härterflüssigkeit tauchen. Tauchgefäß nach Gebrauch verschließen.

Modell hochkant stellen und abkühlen lassen. Wenn der Härter nicht ganz eingezogen ist, Modell noch einmal ca. 5 Minuten in den Ofen zurückstellen.

Gehärtetes Modell abkühlen lassen.

#### 5. Haltbarkeit

Unbegrenzt in der verschlossenen Originalpackung.

#### Gewährleistung

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG ist nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und garantiert für die Produkte, aufgrund eines aufwendigen Qualitätssicherungssystems, eine einwandfreie Qualität. Unsere Anwenderempfehlungen beruhen auf in unserem Versuchslabor ermittelten sog. Richtwerten. Diese Werte können nur garantiert werden, wenn die angegebenen Verfahrensschritte eingehalten werden. Der Benutzer ist für die Bearbeitung der Produkte selbst verantwortlich. Für fehlerhafte Ergebnisse wird nicht gehaftet, da SHERA keinen Einfluß auf die Weiterverarbeitung hat. Eventuell dennoch auftretende Schadensersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Warenwert unserer Produkte.