

1. Indication

SHERAPORAL est un bain durcisseur à base biologique. Il ne contient aucun solvant organique et ne diffuse pas de vapeurs dangereuses pour la santé de l'utilisateur. SHERAPORAL est non-toxique et peut être éliminé facilement.

2. Domaine d'application

Approprié pour tous les revêtements squelettés

3. Manipulation

Verser SHERAPORAL dans un récipient en plastique ou en verre (avec couvercle).
Déshydrater le modèle en revêtement pendant 20 minutes à 170 - 180°C.

4. Bien observer:

Le modèle doit être bien sec.

Plonger dans SHERAPORAL pendant 2 secondes. Placer le modèle à la verticale et laisser sécher.

Si le liquide durcisseur n'est pas parfaitement pénétré dans le revêtement : replacer le modèle pendant 5 minutes à déshydrater à 170°C – 180°C.

Fermer le récipient du bain durcisseur SHERAPORAL après usage.

5. Péréemption du produit

Illimitée si le produit est conservé fermé dans son emballage original.

Garantie

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG est certifié DIN EN ISO13485 et garantit une première qualité à ses produits, grâce aux contrôles effectués en permanence à tous les stades de la production. Nos modes d'emploi se basent sur nos tests en laboratoires et sur nos expériences. Les spécifications techniques sont indicatives mais peuvent être obtenues en suivant absolument à la lettre ce mode d'emploi. L'utilisateur est seul responsable de la façon dont il emploie les produits. Nous ne pouvons être tenus responsables de résultats insatisfaisants, étant donné que nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre des produits. Les dédommagements, qui toutefois peuvent s'effectuer, se limitent uniquement à la valeur commerciale du produit.

