

1. Indicación

SHERAPORAL es un endurecedor de inmersión a base biológica. No contiene ni disolventes orgánicos ni forma ningún tipo de vapores perjudiciales. SHERAPORAL es atóxico y se puede desechar fácilmente de forma normal.

2. Aplicación

Apropiado para todos los revestimientos de esquelético.

3. Preparación con revestimiento de esquelético

Verter SHERAPORAL en un recipiente de plástico o de vidrio (con tapa). Secar el modelo duplicado a 170 - 180°C para aprox. 20 minutos.

4. Le rogamos tener en cuenta lo siguiente:

El modelo tiene que estar bien seco.

Inmergirlo en el líquido endurecedor por aprox. 2 segundos. Después del uso, cerrar el recipiente de inmersión.

Colocar el modelo de forma vertical y dejar enfriar. Si el endurecedor no está absorbido completamente, reponer el modelo en el horno por aprox. 5 minutos.

Dejar enfriar el modelo endurecido.

5. Caducidad

Inlimitada si está almacenado correctamente y en recipiente original bien cerrado.

Garantía

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG posee la certificación DIN EN ISO 13485 y garantiza una total calidad de los productos gracias a un costoso sistema de aseguramiento de la calidad. Las recomendaciones que hacemos a nuestros usuarios están basadas en los datos de referencia obtenidos en nuestro laboratorio de ensayos. Estos datos pueden garantizarse solamente si se siguen los procedimientos descritos. El usuario es el único responsable de la manipulación del producto. No asumimos responsabilidad alguna por resultados defectuosos, ya que SHERA no tiene ningún control sobre la manipulación posterior del producto. Eventuales reclamaciones de indemnización por daños podrán referirse exclusivamente al valor de nuestros productos.