

SHERAPORAL

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Indikation

SHERAPORAL ist ein lösungsmittelfreier Tauchhärter zum Härten und Versiegeln von Modellgusseinbettmassen und zur Verbesserung der Haftung von Wachsmodellationen.

2. Kontraindikation

Tauchhärter nicht erhitzen / erwärmen. Bei Einbettmassen aus Silikondublierungen ist von der Verwendung abzusehen.

3. Verarbeitungshinweise

Anwendung:

- Tauchhärter in ein Kunststoff- oder Glasgefäß (mit Deckel) füllen
- Einbettmassenmodell ca. 20 Minuten bei 170-180°C trocknen.
- 2 Sekunden in Tauchhärter tauchen
- Tauchgefäß nach Gebrauch verschließen
- Modell hochkant stellen und abkühlen lassen
- Gehärtetes Modell abkühlen lassen

Das Modell ist nun bereit für die Modellation und das Anstiften des Modellgusses.

4. Lagerung

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Lagerung in Kunststoffbehältern (z.B. PP, PS, PE), Glasbehältern, Metallbehältern aus Aluminium oder Edelstahl (immer mit Deckel).

5. Entsorgung

Kleinere Mengen können gemeinsam mit dem Hausmüll deponiert werden oder stark verdünnt ins Abwasser entsorgt werden.

6. Gewährleistung

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH ist nach EN ISO 13485 zertifiziert und garantiert für die Produkte, aufgrund eines aufwendigen Qualitätssicherungssystems, eine einwandfreie Qualität. Unsere Anwenderempfehlungen beruhen auf in unserem Versuchslabor ermittelten sog. Richtwerten. Diese Werte können nur garantiert werden, wenn die angegebenen Verfahrensschritte eingehalten werden. Der Benutzer ist für die Bearbeitung der Produkte selbst verantwortlich. Für fehlerhafte Ergebnisse wird nicht gehaftet, da SHERA keinen Einfluss auf die Weiterverarbeitung hat. Eventuell dennoch auftretende Schadensersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Warenwert unserer Produkte.

