



Instrucciones de limpieza y cuidado

para SHERAprint-splint taff & flex





Instrucciones de limpieza y cuidado

Estimado paciente,

Para que pueda disfrutar de su férula, reposicionador, protector bucal o protector nocturno durante mucho tiempo, le recomendamos lo siguiente:

Limpieza diaria

Utilice agua tibia, un cepillo de dientes suave o jabón líquido para la limpieza diaria. Enjuague bien después.

Consejo

- No utilice pasta de dientes, las partículas abrasivas son gruesas y arañan la superficie.
- No utilice ácidos ni disolventes.
- No utilice enjuague bucal.



SHERA Werkstoff-Technologie GmbH

Espohlstr. 53 | 49448 Lemförde | Alemania
Tel.: +49 (0) 5443-9933-0 | www.shera.de