

# SHERAprint-set p1

## ISTRUZIONI PER L'USO

### 1. Indicazioni

Set di lucidatura per la lucidatura rapida di plastiche fotopolimerizzabili per stampa 3D.

### 2. Applicazione

#### Passo 1:

Rimozione della struttura di supporto grossolana con SCOTCH BRITE HS 25 mm grosso, colore marrone.

#### Passo 2:

Rimuovere ulteriori irregolarità sottili (resti della struttura di supporto) con SCOTCH BRITE HS 25 mm fine, colore viola.

A scelta, è possibile prelucidare con SHERABIMPASTE (Rif. Art. 954301) con utilizzo della lucidatrice a motore.

#### Passo 3:

Lucidatura a specchio con emulsione lucidante SHERALUX 711 e DISCO IN COTONE. Qui puoi lavorare con un DISCO DI COTONE da 80 mm per la lucidatrice o un DISCO DI COTONE per il manipolo.

### 3. Smaltimento

Smaltire i prodotti in conformità con le normative locali.

### 4. Garanzia

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH è certificata secondo la norma EN ISO 13485 e garantisce una qualità impeccabile per i suoi prodotti grazie ad un complesso sistema di garanzia della qualità. Le nostre raccomandazioni per gli utenti si basano sui cosiddetti valori guida determinati nel nostro laboratorio di prova. Questi valori possono essere garantiti solo se vengono seguite le fasi procedurali specificate. L'utente è responsabile della lavorazione dei prodotti stessi. Non si accetta alcuna responsabilità per risultati errati poiché SHERA non ha alcuna influenza sull'ulteriore elaborazione. Eventuali richieste di risarcimento danni si riferiscono esclusivamente al valore dei nostri prodotti.

## Inhalt

REF	Nome	Quantità
910320	SCOTCH BRITE HS 25 mm grosso, marrone	6 pz
910319	SCOTCH BRITE HS 25 mm fine, viola	6 pz
910401	DISCO DI COTONE 80 mm 1	pz
910305	DISCO DI COTONE HS 22 mm	6 pz
954211	SHERALUX 711	100 g

Tutti i componenti possono essere riordinati singolarmente.

