

Indication

Spray de scannage pour utilisation extra orale en CAD/CAM. Empêche les reflets des surfaces pour l'enregistrement des modèles par le scan.

Contenance

- Spray de 200 ml
- 1 vaporisateur avec buse oblique pour usage incliné
- 1 vaporisateur avec buse droite pour usage à plat.

Utilisation

- La surface à vaporiser doit être propre et sèche
- Appliquer sur la flacon le vaporisateur approprié.
- Bien secouer le flacon un court instant avant chaque usage
- Pendant la vaporisation: maintenir le flacon verticalement
- Presser toujours complètement sur le vaporisateur pour éviter une obstruction de la buse.
- Vaporiser la surface finement à env. ca. 5 – 8 cm
- Pour obtenir une couche fine et intégrale de la surface grâce à des vaporisations les plus courtes possibles.
- Attendre le séchage du spray avant de scanner.
- Après la prise en charge par le scan, rincer la surface à l'eau et à la vapeur.

Recommandation de prudence

Le récipient est sous pression. Protéger des rayons du soleil et des températures supérieures à 50°C. Même après utilisation complète, ne pas tenter d'ouvrir violemment le flacon ou de le bruler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou une zone incandescente. Maintenir éloigner des sources d'inflammation, ne pas fumer. Stocker hors de portée des enfants.

Garantie

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG est certifié DIN EN ISO13485 et garantit une première qualité à ses produits, grâce aux contrôles effectués en permanence à tous les stades de la production. Nos modes d'emploi se basent sur nos tests en laboratoires et sur nos expériences. Les spécifications techniques sont indicatives mais peuvent être obtenues en suivant absolument à la lettre ce mode d'emploi. L'utilisateur est seul responsable de la façon dont il emploie les produits. Nous ne pouvons être tenus responsables de résultats insatisfaisants, étant donné que nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre des produits. Les dédommagements, qui toutefois peuvent s'effectuer, se limitent uniquement à la valeur commerciale du produit.

