

### **Indicación**

Spray de escaneado para el uso extraoral con CAD/CAM. Evita que la luz reflecte en la superficie, obteniendo así un escaneado ideal de los modelos.

### **Contenido del producto**

- bote de spray de 200 ml,
- 1 cabezal pulverizador con boquilla encorvada para una aplicación más precisa,
- 1 cabezal pulverizador con boquilla recta para la aplicación superficial

### **Aplicación**

- La superficie donde se va a aplicar el spray debe estar limpia y seca.
- Fijar el cabezal pulverizador deseado
- Agitar bien antes de usar.
- Mantener el pulverizador en posición vertical durante el uso.
- Presionar bien el cabezal pulverizador evitando así que se tapone la boquilla.
- Aplicar una capa de spray fina en la superficie deseada con una distancia de entre aprox. 5 y 8 cm.
- Se logra una capa fina y completa con pulverizaciones lo más cortas posibles.
- Después de que se haya secado la superficie se puede empezar con el escaneado.
- Después de la grabación se puede limpiar la superficie con agua o vapor de agua.

### **Aviso de seguridad**

El recipiente está bajo presión. Proteger contra luz solar directa y temperatura de más de 50°C. Incluso después de usar no abrir con violencia ni quemar. No pulverizar sobre una llama abierta o sobre objetos incandescentes. Mantener alejado de toda fuente de ignición – no fumar. Mantener fuera del alcance de los niños.

### **Garantía**

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG posee la certificación DIN EN ISO13485 y garantiza una total calidad de los productos gracias a un costoso sistema de aseguramiento de la calidad. Las recomendaciones que hacemos a nuestros usuarios están basadas en los datos de referencia obtenidos en nuestro laboratorio de ensayos. Estos datos pueden garantizarse solamente si se siguen los procedimientos descritos. El usuario es el único responsable de la manipulación del producto. No asumimos responsabilidad alguna por resultados defectuosos, ya que SHERA no tiene ningún control sobre la manipulación posterior del producto. Eventuales reclamaciones de indemnización por daños podrán referirse exclusivamente al valor de nuestros productos.

