




SHERAFINA®-RAPID

Empfohlene Mischungsverhältnisse von Einbettmassenpulver : SHERALIQUID

Unsere Empfehlungen basieren auf Testergebnissen unseres Labors und sind Richtwerte. Verschiedene Faktoren vor Ort wie z. B. die Raumtemperatur, die Luftfeuchtigkeit oder die Einstellungen des Rührgerätes können die Ergebnisse beeinflussen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung. Bei technischen Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Für einen Einbettmassenbeutel à 160 g benötigen Sie insgesamt 42 ml Flüssigkeit. Die Abmischung der Flüssigkeit entnehmen Sie bitte dieser Tabelle:

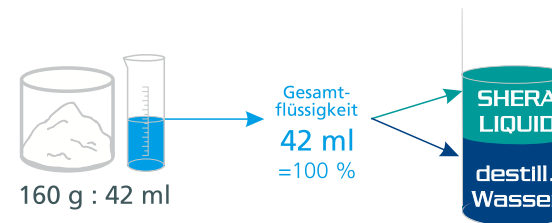

Metalle	Stiftaufbau & Inlay		Wachskronen		Teleskope modelliert in Kunststoff		Konuskronen modelliert in Kunststoff	
	SHERA LIQUID	+ dest. Wasser	SHERA LIQUID	+ dest. Wasser	SHERA LIQUID	+ dest. Wasser	SHERA LIQUID	+ dest. Wasser
Hochgoldhaltige Legierung 70 % - 80 % Au	18 ml 42 %	+ 24 ml 58 %	20 ml 47 %	+ 22 ml 53 %	25 ml 60 %	+ 17 ml 40 %	24 ml 58 %	+ 18 ml 42 %
Goldreduzierte Legierung 55 % - 65 % Au	18,5 ml 44 %	+ 23,5 ml 56 %	21 ml 50 %	+ 21 ml 50 %	28,5 ml 68 %	+ 13,5 ml 32 %	27 ml 65 %	+ 15 ml 35 %
Palladium-Basis-Legierung	33,6 ml 80 %	+ 8,4 ml 20 %	28,5 ml 68 %	+ 13,5 ml 32 %	35 ml 84 %	+ 7 ml 16 %	33 ml 79 %	+ 9 ml 21 %

NEM-Legierung

35,7 ml
85 % + 6,3 ml
15 %

38 ml
90 % + 4 ml
10 %

38 ml
90 % + 4 ml (10%)
SHERA LIQUID-EXTRA

oder Gesamtflüssigkeit reduzieren auf
38 ml = 100% SHERALIQUID