

# SHERAEXACT 85

## INSTRUCCIONES DE USO

### 1. Indicación

SHERAEXACT 85 es una silicona de condensación reticulada muy viscosa para el uso en el laboratorio. Apropiado tanto para la producción de llaves, modelos para composturas y para aislar los dientes de la escayola en la mufla, como todos los otros aplicaciones de una silicona de condensación reticulada.

### 2. Aplicación

1. Sacar la base del cubo con la cuchara dosificadora. (1 cuchara = aprox. 20 gr).
2. Anadir 4 cm (aprox. 0,5 gr) de activador SHERA-PASTENHÄRTER a cada cuchara de SHERAEXACT 85.
3. Amasar ambos componentes de la manera que reciban una pasta de color homogénea.

#### Importante:

Cerrar el cubo de la base y el tubo del activador inmediatamente después de cada uso.

Evitar el contacto del activador con la piel y con los ojos.

Usar guantes protectores.

### 3. Datos técnicos ( tiempos a partir de la mezcla a una temperatura de 23°C )

Tiempo de mezcla	40 segundos
Tiempo de trabajo	aprox. 2,5 minutos
Tiempo de endurecimiento	aprox. 7 minutos
Dureza Shore A (después de 24 horas)	85
Resistencia al calor (°C)	más de 130°C

Más activador y temperaturas más altas reducen el tiempo de endurecimiento, menos activador y temperaturas más bajas aumentan el tiempo de endurecimiento.

### 4. Garantía

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH posee la certificación DIN EN ISO 13485 y garantiza una total calidad de los productos gracias a un costoso sistema de aseguramiento de la calidad. Las recomendaciones que hacemos a nuestros usuarios están basadas en los datos de referencia obtenidos en nuestro laboratorio de ensayos. Estos datos pueden garantizarse solamente si se siguen los procedimientos descritos. El usuario es el único responsable de la manipulación del producto. No asumimos responsabilidad alguna por resultados defectuosos, ya que SHERA no tiene ningún control sobre la manipulación posterior del producto. Eventuales reclamaciones de indemnización por daños podrán referirse exclusivamente al valor de nuestros productos.