

1. Indikation

Entspannungsmittel

- zur Oberflächenentspannung
- verbessert die Fließeigenschaften von Gips in Alginat, Polyether- sowie Silikonabdrücken
- verbessert die Fließeigenschaften von Einbettmassen an Silikon, Wachsen und Kunststoffen

2. Verarbeitungshinweise

- Die gewünschten Oberflächen aus einer Entfernung von 20 - 30 cm sehr dünn einnebeln.
- Nicht abblasen oder trocknen lassen

3. Empfehlungen und Hinweise

Bei zu nassem Aufsprühen können weiche und inhomogene Flächen beim Abbinden des frischen Gipses oder der Einbettmasse entstehen. Zu viel aufgetragenes SHERARELAXA daher vorsichtig abblasen (trocknen).

4. Lagerbeständigkeit

Mindestens 24 Monate in verschlossenen Gebinden in trockenen Räumen.

Gewährleistung

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG ist nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und garantiert für die Produkte, aufgrund eines aufwendigen Qualitätssicherungssystems, eine einwandfreie Qualität. Unsere Anwenderempfehlungen beruhen auf in unserem Versuchslabor ermittelten sog. Richtwerten. Diese Werte können nur garantiert werden, wenn die angegebenen Verfahrensschritte eingehalten werden. Der Benutzer ist für die Bearbeitung der Produkte selbst verantwortlich. Für fehlerhafte Ergebnisse wird nicht gehaftet, da SHERA keinen Einfluß auf die Weiterverarbeitung hat. Eventuell dennoch auftretende Schadensersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Warenwert unserer Produkte.